

# Multi-Gyn® IRYGATOR DOPOCHWOWY



PRZED UŻYCIEM IRYGATORA DOPOCHWOWEGO MULTI-GYN ORAZ TABLETEK MULTI-GYN NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INFORMACJE ZAWARTE W ULOTCE. NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ ULOTKĘ, ABY MÓC JĄ PONOWNIE PRZECZYTAĆ W RAZIE POTRZEBY.

**Irygator dopochwowy Multi-Gyn** - do przyjaznej kobietom optymalnej higieny pochwy

- Oczyszcza łagodnie i skutecznie
- Specjalna zastawka zapobiega zwrotnemu zasysaniu płynu, redukuje wzrost ciśnienia i daje idealny efekt irygacji
- Ergonomiczny kształt irygatora pozwala na wygodne używanie w różnych pozycjach

## Zastosowanie

- Ogólna higiena pochwy
- Intensywna higiena pochwy w przypadku obfitych upławów nieprzyjemnego zapachu, świądu, podrażnienia czy pieczenia

## Wskazania do użycia

Niektóre kobiety są bardziej podatne niż inne na występowanie dolegliwości intymnych z powodu stylu ich życia, aktywności seksualnej czy też miesiączki. W zależności od indywidualnych potrzeb higienicznych irygator dopochwowy Multi-Gyn może być używany częściej, aczkolwiek nie zaleca się stosowania częstszego niż 3 razy w tygodniu chyba, że lekarz zaleci inaczej.

W przypadku utrzymywania się dolegliwości zawsze skontaktuj się z lekarzem.


Irygator dopochwowy Multi-Gyn może być używany w wielu wygodnych pozycjach. Znajdź najwygodniejszy dla siebie sposób irygacji. Ważne jest, aby płyn w trakcie zabiegu płukania mógł w łatwy sposób odpływać, np. pod prysznicem, w wannie lub nad toaletą. Zobacz poniżej zilustrowane sposoby użycia irygatora dopochwowego Multi-Gyn.

## Irygator dopochwowy Multi-Gyn a ciąża


W przypadku planowania ciąży radzimy, aby nie stosować irygatora dopochwowego Multi-Gyn w ciągu 3 dni po odbyciu stosunku płciowego. Irygator dopochwowy Multi-Gyn nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Nie ma znanych przeciwwskazań do użycia irygatora dopochwowego Multi-Gyn lub tabletek Multi-Gyn w trakcie trwania ciąży czy karmienia piersią, ale w czasie ciąży zalecana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym.

## Uwaga!


Nigdy nie wkładaj irygatora dopochwowego Multi-Gyn do wrzącej wody ani nie czyść wrzącą wodą ze względu na ryzyko nieodwracalnego zdeformowania urządzenia.

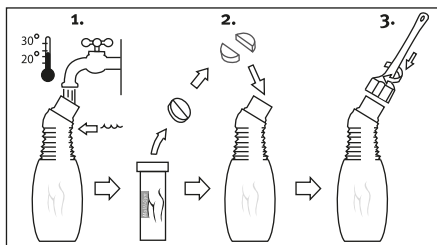

1. Napełnij irygator dopochwowy Multi-Gyn letnią wodą do poziomu górnej części ożebrowania
2. Przełam jedną tabletkę Multi-Gyn i dodaj ją do wody
3. Nakręć aplikator na pojemnik i poczekaj aż tabletkę Multi-Gyn całkowicie się rozpuści i przestanie musować

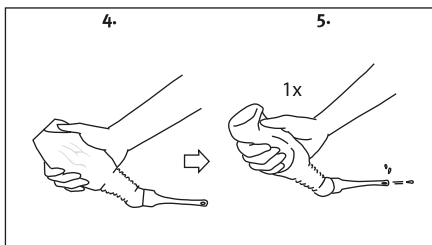

4. Wsuń aplikator delikatnie do pochwy
5. Delikatnie ściśnij butelkę, by oczyścić pochwę płynem irygacyjnym. To normalne, że część płynu pozostanie w butelce (nawet do połowy butelki)\*

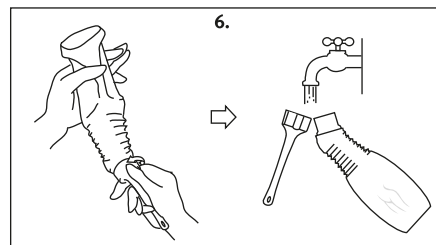

6. Odkręć aplikator od butelki i przepłucz oba elementy ciepłą wodą. Pozostaw w suchym miejscu, aż w sposób naturalny wyschną.

\* Objętość płynu jest wystarczająca do wyptukania pochwy. Jeśli chcesz wyptukać pochwę raz jeszcze używając pozostałego płynu odkręć aplikator od butelki, co spowoduje powrót do jej oryginalnego kształtu i postępuj dalej począwszy od punktu 4.

## TABLETKI Multi-Gyn®

**Tabletki Multi-Gyn** – do przygotowywania naturalnego i delikatnego płynu do irygacji dla optymalnej higieny pochwy.

### Cechy produktu:

- 1 tabletkę wystarczy do przygotowania 1 butelki roztworu do irygacji
- Zawiera naturalne składniki, bez konserwantów i substancji zapachowych
- W zestawie z irygatorem dopochwowym tabletki Multi-Gyn zapewniają optymalną higienę pochwy

### Tabletki do delikatnej irygacji pochwy z naturalnymi składnikami

Tabletki Multi-Gyn po rozpuszczeniu w letniej wodzie tworzą delikatny płyn irygacyjny do stosowania z irygatorem dopochwowym Multi-Gyn. Skoncentrowane tabletki musujące zawierają naturalne składniki i nie zawierają konserwantów. Składniki zawarte w tabletkach Multi-Gyn nie wpływają negatywnie na naturalną florę pochwy.

### Składniki aktywne:

Kompleks 2QR\*, kwas mlekowy, kwas askorbinowy, laktoza

\*kompleks 2QR to opatentowany kompleks bioaktywnych polisacharydów

Tabletki mogą delikatnie różnić się kolorem. Te drobne różnice spowodowane są naturalnymi właściwościami głównego składnika aktywnego, 2QR. Nie wpływają one na skuteczność lub bezpieczeństwo produktu.

### Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Zaleca się przechowywać tabletki Multi-Gyn w oryginalnej tubie w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C (temperatura pokojowa).

### Dystrybutor w Polsce:

Qpharma Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 7F/10  
04-682 Warszawa

**Wytwórca:**  
BioClin BV, Delftechpark 55,  
2628 XJ, Delft, Holandia